

SuperTalker



Bedienungsanleitung

Ein Produkt von



AbleNet Inc.

Inhalt

Willkommen beim SuperTalker!	3
Der SuperTalker in der Übersicht	3
Den SuperTalker kennen lernen	3
Batterien einsetzen	4
Deckblatt und Abdeckgitter	4
Auswahl der Ebene	5
Zahl der Tasten einstellen	5
Aussagen einer Ebene aufnehmen	5
Aussagen wiedergeben	5
Weitere Ebenen mit Aussagen belegen	5
Lautstärke	5
Lautstärkeregler sperren	6
Ablage für Abdeckgitter	6
Blankodeckblätter	6
Buchse für externe Taste („STEP AHEAD JACK“)	6
Transport	6
Ein- / Aus-Schalter	7
Warnhinweis bei nur noch geringem freiem Speicher	7
Alle Mitteilungen löschen	7
Warnhinweis bei geringer Batteriekapazität	7
Pflege	7
Garantie	7
Deckblattvorlagen	8

Hinweis

Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung erfolgen ohne Gewähr und können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. AbleNet geht damit keinerlei Verpflichtung ein. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der AbleNet Inc. sind die vollständige oder teilweise Fotokopie und Reproduktion dieser Bedienungsanleitung sowie die Übersetzung in andere Sprachen nicht zulässig.

Die CE-Kennzeichnung des SuperTalkers erfolgt gemäß der Richtlinie 93/42 EWG.



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird. Privathaushalte in den 25 Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammeleinrichtungen kostenfrei zurückgeben oder aber an den Händler zurückgeben, von dem sie es erworben haben.

Willkommen beim SuperTalker!

Der SuperTalker ist eine einfach zu bedienende, äußerst flexible Kommunikationshilfe. Durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten deckt er einen wichtigen Bereich in der frühen unterstützten Kommunikation ab.

Egal, ob Sie nur eine sprechende Großtaste benötigen, erste Auswahlmöglichkeiten bieten wollen oder Gruppenaktivitäten steuern lassen wollen: mit einer Tastenanzahl von einem Feld bis hin zu bis acht Feldern stellt der SuperTalker für den Benutzer bei vielen Aktivitäten und über einen langen Zeitraum eine wertvolle Hilfe dar.

Der SuperTalker in der Übersicht

- 8 getrennte Vokabularebenen
- pro Ebene frei wählbare Tastenanzahl 1, 2, 4 oder 8
- mitgelieferte Abdeckgitter für alle Tastaturgrößen
- 8 Minuten Speicher, dynamisch verteilbar
- keine vorgegebenen Zeitgrenzen für einzelne Tastenfelder
- schrittweises Aufzählen aller Aussagen einer Ebene über externe Taste („Plauderpläne“)
- Batteriebetrieb (4 x AA) mit langer Batterielebensdauer
- Aussagen bleiben erhalten auch bei leeren Batterien
- Tragegurt optional erhältlich

Den SuperTalker kennen lernen


Der SuperTalker ist eine einfach zu bedienende, äußerst flexible Kommunikationshilfe. Betrachten Sie die Oberseite, die Rückseite und die rechte Seite des Gerätes, um alle zur Bedienung benötigten Knöpfe und Anschlüsse kennen zu lernen.



Batterien einsetzen

Öffnen Sie das Batteriefach in der Unterseite des SuperTalkers. Legen Sie vier Batterien vom Typ AA (Mignon) so ein, dass der Pluspol jeweils nach links zeigt (wie auf dem Batteriefachdeckel abgebildet). Schließen Sie die Klappe wieder.

Hinweis: PRD empfiehlt die Verwendung von Alkalibatterien. Vom Gebrauch wiederaufladbarer Batterien (Akkus) wird abgeraten!

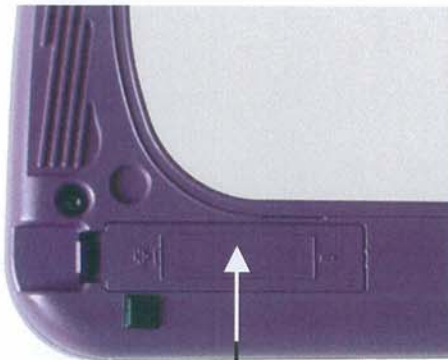

Batteriefach



Deckblatt und Abdeckgitter

Entfernen Sie vorsichtig das auf der Oberseite des SuperTalkers angebrachte Abdeckgitter und legen Sie das gewünschte Deckblatt auf. Befestigen Sie anschließend das passende Abdeckgitter wieder auf dem SuperTalker.

Sollte das zum Deckblatt passende Abdeckgitter nicht das sein, was auf dem SuperTalker befestigt gewesen ist, so befindet es sich im dafür vorgesehenen Fach in der Unterseite des SuperTalkers.

Alle nicht benötigten Abdeckgitter sollten stets im Fach in der Unterseite des SuperTalkers verstaut werden. So befinden sie sich immer beim SuperTalker.



Auswahl der Ebene

Der SuperTalker verfügt über 8 getrennte Ebenen für Vokabular. Für jede Ebene kann die Zahl der verwendeten Tasten separat eingestellt werden. Stellen Sie mit Hilfe des Drehrades „LEVEL“ auf der Rückseite des SuperTalkers die gewünschte Ebene ein. Wenn Sie ein Deckblatt für den SuperTalker entworfen haben, sollten Sie die Nummer zugehörigen Ebene auf dem Deckblatt vermerken.



EBENE


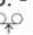


Zahl der Tasten einstellen

Der SuperTalker bietet die Möglichkeit, die Zahl der Tasten auf der Tastatur und damit die Tastengröße einzustellen. Wählen Sie zwischen 1, 2, 4 oder 8 Tasten. Stellen Sie die Tastenanzahl mit Hilfe des Schiebeschalters „GRID“ auf der Rückseite des SuperTalkers so ein, dass sie zur Zahl der Felder auf dem Deckblatt passt. Falls es nicht offensichtlich ist, sollte die Zahl der zugehörigen Felder auf dem Deckblatt vermerkt werden.



Aussagen einer Ebene aufnehmen

1. Schalten Sie den SuperTalker mit der Taste I/O ein. Die Aufnahme-LED leuchtet kurz rot, dann gelb auf.
2. Drücken Sie den Knopf  „RECORD“ ca. 1 Sekunde lang. Die Aufnahme-LED leuchtet rot und zeigt an, dass der SuperTalker im Aufnahmemodus ist.
3. Drücken Sie die Taste, der Sie eine Aufnahme zuweisen wollen, und halten Sie sie fest. Die Aufnahme-LED blinkt rot.
4. Sprechen Sie die Aussage in das Mikrofon in der Oberseite des SuperTalkers. Sprechen Sie in einer Entfernung von ca. 25 - 30 cm in normaler Lautstärke in Richtung des Mikrofons, wenn Sie eine Aussage aufnehmen.
5. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie die Aussage zu Ende gesprochen haben.
6. Wiederholen Sie Schritt 3. - 5. für jede weitere Aussage, die Sie aufnehmen wollen.
7. Drücken Sie den Knopf  „RECORD“ erneut, um das Aufnehmen von Aussagen zu beenden. Die rote Aufnahme-LED erlischt.

Hinweise:

- Wenn Sie die Zahl der Tasten für eine Ebene über den Schalter „GRID“ ändern, werden alle Aufnahmen gelöscht.
- Wenn **20 Sekunden** lang keine Aufnahme machen, schaltet sich der Aufnahmemodus von selbst ab.
- Ist der freie Speicher des SuperTalkers auf weniger als 2 Minuten reduziert, so blinkt die Aufnahme-LED in gelb statt in rot.
- Zur Vermeidung von Störgeräuschen wählen Sie zum Aufnehmen eine ruhige Umgebung.
- In unruhigen Umgebungen gehen Sie beim Aufnehmen näher an das Mikrofon.

Aussagen wiedergeben

1. Stellen Sie die Zahl der Tasten („GRID“) und die Ebene („LEVEL“) auf das gewählte Deckblatt ein.
2. Drücken Sie die gewünschte Taste. Die Aufnahme-LED leuchtet kurz gelb auf und die gespeicherte Aussage wird wiedergegeben.

Hinweise:

- Stimmen eingestellte Tastenanzahl und verwendetes Deckblatt bzw. Abdeckgitter nicht überein, werden Aussagen u. U. nicht richtig wiedergegeben.
- Wenn Sie nichts hören, prüfen Sie, ob die Lautstärke komplett herunter geregelt wurde.
- Wurde eine Taste gedrückt, für die keine Aussage aufgenommen wurde, so blinkt die Aufnahme-LED einmal kurz rot auf.

Weitere Ebenen mit Aussagen belegen

1. Wählen Sie mit dem Drehregler „LEVEL“ die zu belegende Ebene.
2. Folgen Sie Abschnitt „Aussagen einer Ebene aufnehmen“, Anweisungen 2. – 7.

Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke ein durch Drücken der Tasten „lauter“  bzw. „leiser“  auf der Oberseite des SuperTalkers. Dies kann während der Wiedergabe einer Mitteilung erfolgen, aber auch danach oder davor.

Wird einer der Tasten „lauter“ oder „leiser“ gedrückt, so blinkt die Aufnahme-LED kurz gelb auf. Haben Sie den Minimal- bzw. Maximalwert erreicht, so blinkt die Aufnahme-LED kurz rot auf.

Aufgrund der Anordnung und Größe des Lautstärkereglers kann die Lautstärke auch vom Benutzer selber eingestellt werden.

Lautstärkeregler sperren

Die Möglichkeit, die Lautstärke bequem über die beiden Tasten auf der Oberseite des SuperTalkers einstellen zu können, kann deaktiviert werden. Die Lautstärke lässt sich dann durch den Benutzer nicht mehr verstellen.

1. Entfernen Sie das Abdeckgitter und das Deckblatt
2. Drücken Sie gleichzeitig die beiden mit je einem Pfeil gekennzeichneten Stellen auf der Tastatur:



3. Um die Lautstärke wieder verstellen zu können, deaktivieren sie die Sperre. Wiederholen Sie dazu Schritt 1. und 2.

Ablage für Abdeckgitter

Der SuperTalker verfügt über ein Ablagefach für bis zu 3 der 4 mitgelieferten Abdeckgitter (siehe S. 4). Zusammen mit dem gerade benutzten Abdeckgitter haben sie so die Möglichkeit, alle Abdeckgitter stets dabei zu haben.

1. Öffnen Sie die große Klappe in der Unterseite des SuperTalkers.
2. Nehmen Sie das gewünschte Abdeckgitter hinaus.
3. Legen Sie die nicht benötigten Abdeckgitter mit der abgerundeten Seite nach oben in das Ablagefach.
4. Schließen Sie das Ablagefach wieder.

Blankodeckblätter

1. Kopiervorlagen für Blankodeckblätter finden Sie weiter hinten in diesem Handbuch
2. Fragen Sie Ihren Händler nach Vorlagen für Word und BoardMaker zum Erstellen von Deckblättern mit dem Computer.

Buchse für externe Taste („STEP AHEAD JACK“)

Diese Buchse ermöglicht die Nutzung von so genannten Plauderplänen in Verbindung mit einer externen Taste. Alle Aussagen in der jeweiligen Ebene werden nacheinander (eine pro Tastenaktivierung) wiedergegeben.

1. Wählen Sie Deckblatt und stellen Sie Ebene und Tastenanzahl entsprechen der Vorlage ein.
2. Schließen Sie eine für den Benutzer geeignete Taste an die Buchse „STEP AHEAD JACK“ an der rechten Seite des SuperTalkers an.
3. Bei jeden Tastendruck spricht der SuperTalker eine in der Ebene gespeicherte Aussage. Die Reihenfolge entspricht den auf dem jeweiligen Abdeckgitter aufgedruckten Tastennummern:




4. Sind alle Aussagen einer Ebene abgerufen worden und wird die externe Taste erneut aktiviert, beginnt der SuperTalker wieder mit der Wiedergabe ersten Aussage.

Transport

Für den Transport des SuperTalkers ist ein als Zubehör angebotener Trageriemen (BM-TS) erhältlich.

Zum Montieren des Trageriemens gehen Sie so vor:

1. Packen Sie Gurt, Gurtösen und Schrauben aus. Stecken Sie die Schrauben durch die Gummimuffen.
2. Befestigen Sie die Gurtösen mit Hilfe der durch die Gummimuffen gesteckten Schrauben, in dem Sie diese in die Gewindebuchsen seitlich am SuperTalker drehen. Drehen Sie die Schrauben gut fest, ohne sie zu überdrehen.

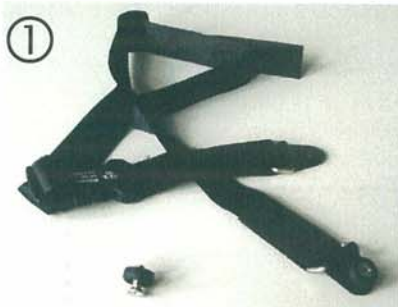

3. Bringen Sie den Gurt in die gewünschte Länge.
4. Die Gurtenden sind geklettet. So können Sie den Gurt einfach lösen, ohne die Gurtösen vom SuperTalker entfernen zu müssen. Wenn Sie einen mit Gurtösen versehenen SuperTalker auf einem Tisch benutzen wollen, drehen Sie Gurtösen so nach oben, dass der SuperTalker einen guten Stand hat und nicht kipelt.



5. Wenn Sie den Gurt wieder anbringen, achten Sie darauf, dass Sie die Enden gut verkletten.

Ein- / Aus-Schalter

Mit dem Ein- / Ausschalter auf der Rückseite kann der SuperTalker permanent ausgeschaltet werden. Beim Transport des SuperTalkers verhindert dies, dass versehentlich Aussagen abgerufen werden und sich die Batterien unnötig entleeren.

Warnhinweis bei nur noch geringem freiem Speicher

Sind nur noch weniger als 2 Minuten Speicher des SuperTalkers für Mitteilungen frei, so blinkt die Aufnahme-LED in gelb statt in rot, wenn Sie eine Aufnahme machen.

Alle Mitteilungen löschen

Wollen Sie alle im SuperTalker gespeicherten Aussagen auf einmal löschen, so drücken und halten Sie die Aufnahmetaste „RECORD“, bis die rote Aufnahme-LED auf der Oberseite des Gerätes nach dem Aufleuchten wieder erlischt.

Warnung: diese Methode löscht alle Aussagen in allen Ebenen des SuperTalkers!

Warnhinweis bei geringer Batteriekapazität


Beginnt die rote „LOW BAT“-LED an der rechten Seite des SuperTalkers zu blinken, so ist die Kapazität der Batterien erschöpft. Wechseln Sie die Batterien in nächster Zeit aus.

Pflege


Falls der SuperTalker schmutzig geworden ist, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder ein wenig Seifenwasser ab. In der Nähe der Buchsen und des Lautsprechers sollte kein Wasser verwendet werden. **Das Gerät niemals in Wasser eintauchen!**

Garantie

AbleNet gibt Ihnen auf dieses Produkt 12 Monate Garantie. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden auf Grund unsachgemäßer Benutzung.

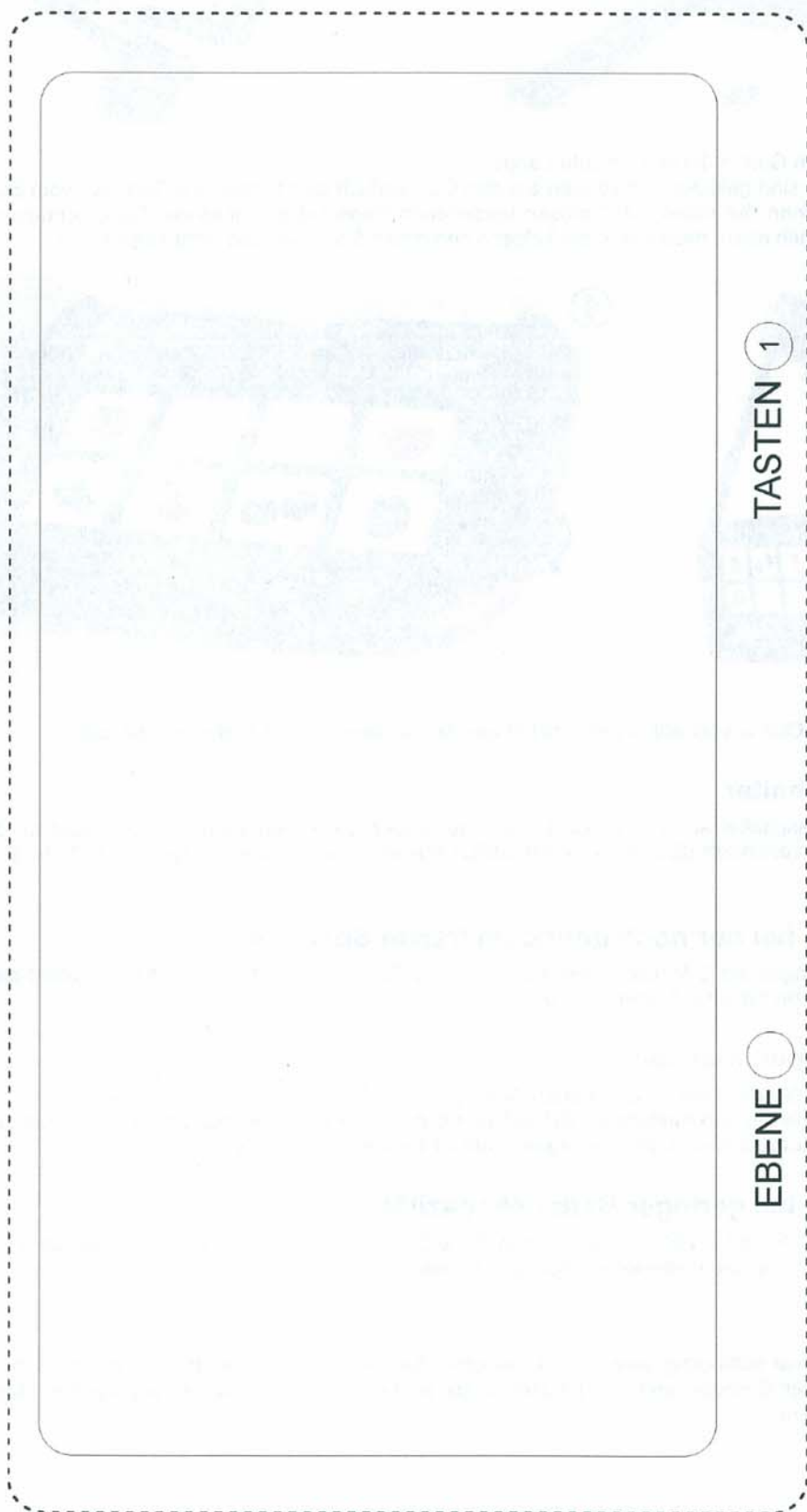

Deckblatt nach dem Kopieren entlang der gestrichelten Linie ausschneiden

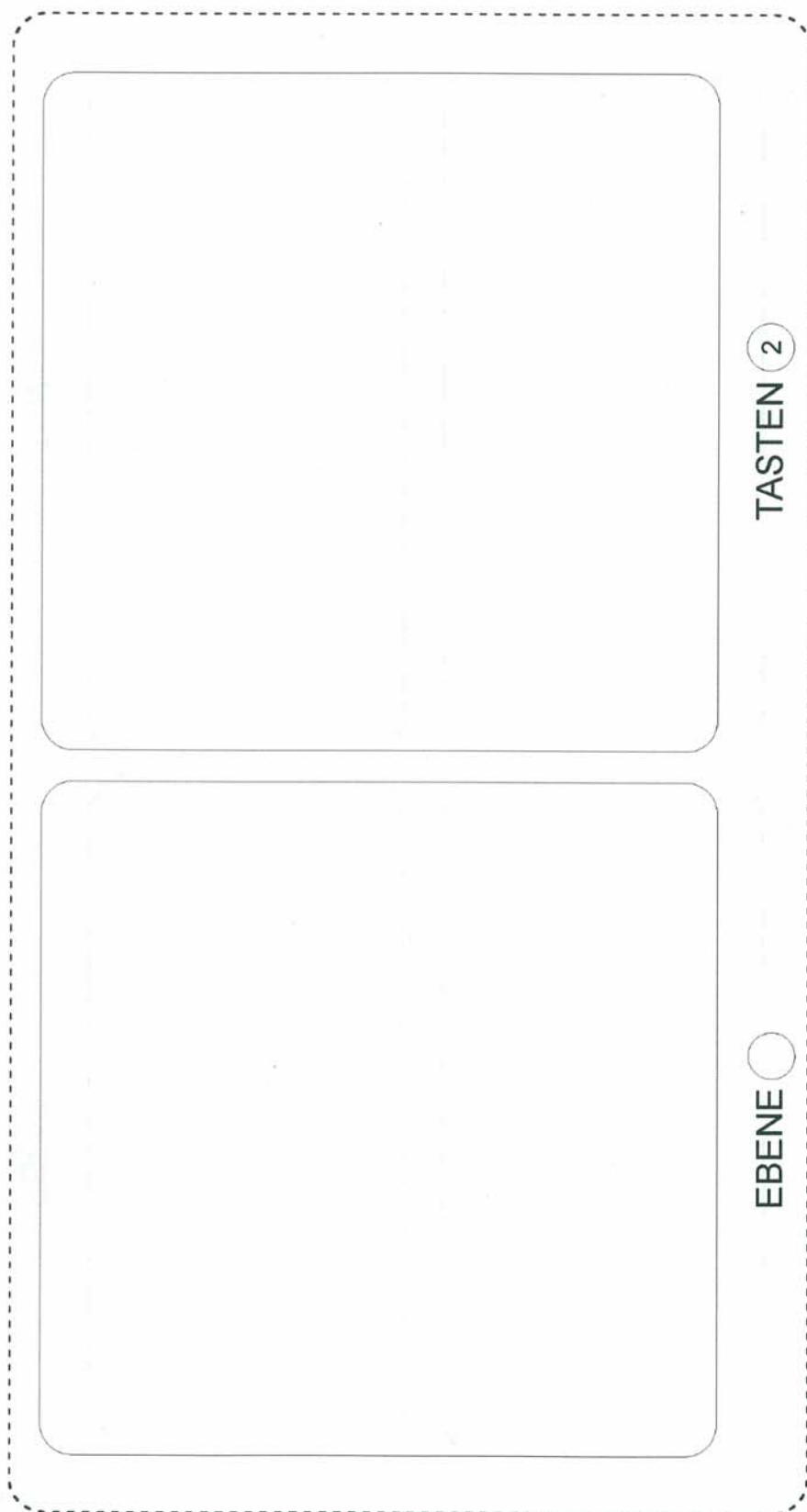

Deckblatt nach dem Kopieren entlang der gestrichelten Linie ausschneiden

		TASTEN 4
		EBENE

Deckblatt nach dem Kopieren entlang der gestrichelten Linie ausschneiden

EBENE ○ TASTEN ○ 8

Deckblatt nach dem Kopieren entlang der gestrichelten Linie ausschneiden

Ihr autorisierter Fachhändler:

LifeTool Logistik
Hafenstraße 47 - 51
4020 Linz



Tel: 0732 9015 5270
Fax: 0732 9015 5271
E-Mail: logistik@lifetool.at