



**INTEGRA
TOOLS**

Formerly
LIFEtool Solutions



VERSION
// 0.6

IntegraMouse[®] AIR Kurzanleitung

integramouse.com



Deutsch (DE)



**Inbetriebnahme,
Reinigung & Nutzung**

Inbetriebnahme

Montage der IntegraMouse® AIR

1.



Führen Sie das Mundstück ein, achten Sie auf Zapfen und Führung.

2.



Drehen Sie unter leichtem Druck das Mundstück gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

3.



Befestigen Sie die IMAIR an Ihrem Halterungssystem (1/4"-Gewinde).

4.



Bringen Sie die IMAIR in die gewünschte Position.

Für die erste Inbetriebnahme empfehlen wir den Betrieb mit Kabelverbindung.

5.



Stecken Sie das Kabel in die USB-C Buchse am hinteren Ende der IMAIR.

6.




Stecken Sie das USB-Kabel in den Computer (USB-A Buchse).

7.



Drücken Sie kurz auf die rechte Lippentaste, um die IMAIR einzuschalten.

8.

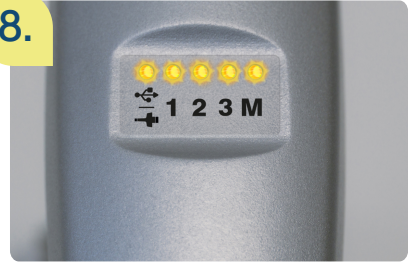

Alle LEDs leuchten kurz auf, die IMAIR kalibriert sich automatisch.

9.



Die linke LED leuchtet (Kabelverbindung).
Die rechte LED (M) ist aus (Mausmodus).



**Bitte während
dem Kalibrieren
das Mundstück
nicht berühren!**

Folgende Schritte passieren automatisch:

- Der interne Akku wird geladen.
- Ihr Computer installiert die IntegraMouse AIR als Standard-Maus.

Kurzanleitung zur kabellosen Inbetriebnahme

(Koppeln über Bluetooth)



Um die IntegraMouse AIR mit Bluetooth zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Benutzen Sie dazu das beiliegende Ladegerät und laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme.

1.



Drücken Sie kurz auf die rechte Lippentaste (IMAIR einschalten).

2.



Alle LEDs leuchten kurz auf, die IMAIR kalibriert.

3.



Die linke LED leuchtet.

4.



Drücken Sie die linke Lippentaste für 3 Sekunden.

5.



LED 1 beginnt orange zu blinken.

6.




Wählen Sie durch Drücken der linken Lippentaste die gewünschte Position (1, 2 oder 3).

7.



Warten Sie kurz, bis die gewählte LED blau blinkt.

8.

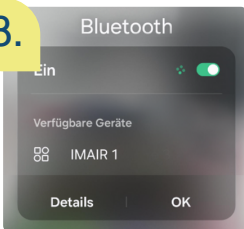

Starten Sie die Gerätesuche auf dem Endgerät, wählen Sie IMAIR.

9.



Bei erfolgreicher Koppelung stoppt das Blinken und die LED leuchtet orange.

Allgemeine Hinweise zur Reinigung



Verwendung der IntegraMouse AIR im klinischen Bereich

- Im klinischen Bereich sind das Mundstück (inkl. Membran und Silikonaufsatz) und die Lippentasten als Wegwerfprodukt zu verwenden.
- Wechselintervalle für das Mundstück (inkl. Membran und Silikonaufsatz) und die Lippentasten legt das fachkundige Personal oder der Arzt/die Ärztin fest.
- Bei Verdacht auf ansteckende Krankheiten bitte zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen (z.B. Handschuhe beim Wechseln des Mundstücks tragen).

Wischdesinfektion

- Verwenden Sie nur Oberflächen-Desinfektionsmittel, die für LEXAN Polycarbonat geeignet sind.
- Wir empfehlen von Schülke & Mayr (www.schuelke.com): Mikrozyd Sensitive Liquid; Mikrozyd Sensitive Wipes oder gleichwertige Produkte



Keine Nass- oder Gammasterilisation anwenden

Das Mundstück, die Lippentasten und andere Komponenten der IntegraMouse AIR dürfen nicht mit Nass- oder Gammasterilisation gereinigt werden.

Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden

Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, dies zerstört die Oberfläche der Komponenten.

Nicht in Wasser eintauchen

Tauchen Sie die IntegraMouse AIR und ihre elektronischen Komponenten niemals in Wasser und verwenden Sie niemals fließendes Wasser zur Reinigung – dies beschädigt die Elektronik dauerhaft.



Richtiges Reinigen der Komponenten

- Die Komponenten IntegraMouse AIR, Netzteil samt Kabel und Stativ mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch abwischen
- Reinigen Sie die Komponenten einmal wöchentlich.

Kurzanleitung Mundstück reinigen & Membran wechseln

Reinigungs- & Entsorgungsintervall Mundstück und Lippentasten

Reinigen: Die IntegraMouse AIR besitzt eine Erinnerungsfunktion für die Reinigung und erinnert Sie nach der empfohlenen Benutzungsdauer durch eine blinkende LED (siehe S.8)

- mindestens einmal pro Woche
- im Krankheitsfall öfter

Entsorgen:

- bei Beschädigungen oder Abnützungserscheinungen
- spätestens nach sechs Monaten

Entsorgungsintervall Membran

Membran immer entsorgen. Von einer Reinigung wird dringend abgeraten.



Mundstück zuerst im Uhrzeigersinn drehen und dann gerade abziehen



Membran entfernen und entsorgen



In einem Dampfsterilisator auskochen



Mundstück abtrocknen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen

5.



Neue Membran auf das Mundstück aufsetzen

6.



Mundstück einsetzen (Zapfen und Führung beachten) und mit leichtem Druck gegen den Uhrzeigersinn drehen



Das
Mundstück kann
auch in einem
Kochtopf mit Wasser
ausgekocht
werden.

- Wasser zum Kochen bringen
- Mundstück mit Löffel in den Kochtopf geben, sodass es vollständig mit Wasser benetzt ist
- Mindestens 5 Minuten im kochenden Wasser lassen
- Anschließend vorsichtig mit dem Löffel wieder aus dem Kochtopf nehmen

Funktionalitäten der IntegraMouse AIR

Die IntegraMouse AIR bietet 3 Bedien-Modi; Standard-Modus ist der Maus-Modus

	Maus	Tastatur	Gamepad
Bewegen des Mundstücks: • nach oben • nach unten • nach links • nach rechts			
Saugen	Links-klick 	Leer-taste 	Button 1 
Blasen	Rechts-klick 	Enter-taste 	Button 2 
Mikrofon	Hinweis: An der Unterseite befindet sich ein Mikrofon. Dieses kann ausschließlich im Kabelbetrieb verwendet werden.		
Kalibrieren: Rechte Lippentaste 3 Sekunden drücken	Alle LEDs blinken gleichzeitig. ⓘ Mundstück bitte nicht berühren		
Gerät wechseln: Linke Lippentaste kurz drücken	1x Kabel 3x Bluetooth	   	
Modus wechseln: Rechte Lippentaste kurz drücken	 Maus	 Tastatur	 Gamepad
Erinnerung Mundstückwechsel	LED 0 blinkt orange. Beide Lippentasten gleichzeitig drücken, um Timer zurückzusetzen		
Warnung niedriger Akkuladestand	Bei niedrigem Akkuladestand im Drahtlosbetrieb beginnen die LEDs 1, 2 oder 3 orange zu blinken.		
Aufwecken aus Standby-Modus: Mundstück bewegen	Hinweis: IMAIR wechselt nach 12 Sekunden ohne Eingabe in den Standby-Modus (LEDs sind aus).		
Ausschalten: Rechte Lippentaste 6 Sekunden drücken.	Hinweis: IMAIR muss aktiv sein (LED leuchtet). Drücken Sie so lange, bis alle LEDs aus sind.		



Für weitere Einstellmöglichkeiten und Funktionen laden Sie sich bitte die kostenlose Einstellungs-App von der IntegraMouse Webseite unter www.integramouse.com runter. Dort finden Sie weitere nützliche Informationen und Konfigurationen.